

## TERMÓMETRO DE MERCURIO PRISMÁTICO ORAL

### INDICACIONES DE USO

- Limpie el termómetro con alcohol antes de usarlo.
- Cerciórese que el mercurio esté debajo de la escala numérica, en caso contrario, tome el termómetro por la parte superior y con movimientos vigorosos haga descender el mercurio.
- Puede ser utilizado para tomar la temperatura en forma axilar u oral. Mantenga el termómetro mínimo 3 minutos para una lectura más precisa.
- Después de esto, observe en qué posición se encuentra el mercurio con relación a la escala numérica, y así determine la temperatura del paciente.
- Se recomienda guardar el termómetro en su estuche para evitar que éste se rompa.

### DIMENSIONES

- Longitud total 101.5 mm + 10%.
- Diámetro del bulbo 5 mm + 10%.

### ESPECIFICACIONES

Termómetro de mercurio prismático, para medir la temperatura corporal que comprende divisiones de décimas de grado entre 32°C a 42°C. Cuerpo de vidrio, de fácil visibilidad, marcación clara y visible. Envase de plástico para transporte.

### PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

Caja con 12 unidades.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado.

