

Código

CMMX3-740U

Producto en
Convenio Marco



REMOVEDOR DE OXIDO



INDICACIONES DE USO

Con un cepillo de cerdas duras humedecido, retire del pote una porción de removedor. Cepille el lugar donde el instrumental presenta manchas de oxido o restos de materia orgánica. Realice la acción sobre una superficie plana para no provocar daños al instrumental. Enjuague con abundante agua (de preferencia tibia)

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Lavar con Agua Tibia durante al menos 15 minutos. Busque asistencia médica cuanto antes. **Piel:** Lavar con Agua Tibia durante al menos 15 minutos. **Ingestión:** No induzca vómitos. Dé cantidades grandes de agua o leche. No dé nada a una persona inconsciente o que convulsiona. Busque asistencia médica.

Inhalación: Si nota cualquier síntoma de enfermedad, lleve a la persona al aire fresco. Busque la asistencia médica si es necesario.

ESPECIFICACIONES

Producto compuesto de menos del 15 % de ácido cítrico (CAS # 77-92-9) y más del 75% de piedra pómez (CAS #1332-09-8).

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

Removedor de Oxido 85 grs.
Caja con 12 unidades

ALMACENAMIENTO

Almacenaje: Guarde en un lugar fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no este en uso.
Manejo: Ninguna precaución inusual.



Sasf: ISO 9001 - 2008
Proveedor: ISO 9001, 13485;



Importado y distribuido por: Sasf Ltda. División Insumos Médicos

Antillanca 595, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel • Teléfono (+562) 2892 0201 www.sasf.cl • contacto@sasf.cl

